



Urimed[®] Vision

Externe katheter voor mannen

Verbeter de kwaliteit van leven van
jouw patiënten met incontinentie

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Als continence professional zie je regelmatig mannen met incontinentie. Deze klachten beïnvloeden de levenskwaliteit van deze groep patiënten aanzienlijk en hebben ook impact op de gezondheidszorg in het algemeen.




Wist je dat?

423 miljoen

mensen over de hele wereld worden getroffen door
urine-incontinentie

Maar 22%

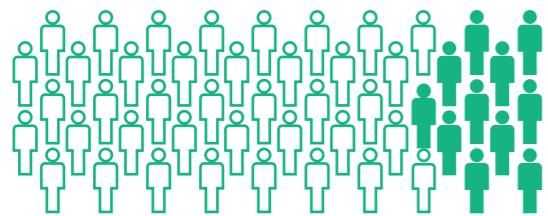

van de getroffen mannen **zoekt hulp**
voor hun symptomen.²

Onbehandelde incontinentie kan leiden tot onnodige ziekenhuisopnames en kosten voor de gezondheidszorg

1,4 tot 2,1 van 100.000 mannen met UI hebben een een ziekenhuisopname nodig van 3,0 tot 4,2 dagen.³

De jaarlijkse kosten voor individuen (met UI) in de thuisituatie worden geschat op 6,5 miljoen euro.³



De Urimed® Vision uitwendige katheter voor mannen ondersteunt je patiënten in het omgaan met urine-incontinentie en verbetert zo de levenskwaliteit van je patiënten.



Verbeteringen in kwaliteit van leven, door het gebruik van mannelijke uitwendige katheters zijn aangetoond in een klinische studie:

- Externe katheters hebben een positieve invloed aangetoond op de kwaliteit van leven bij matig tot ernstig incontinentie mannen.⁴
- Mannen geven de voorkeur aan een externe katheter in plaats van absorberende materialen.⁴

Urimed® Vision

Effectief management van incontinentie met behoud van een actief leven

De Urimed® Vision, uitwendige katheter voor mannen is eenvoudig aan te brengen, efficiënt en betrouwbaar. De uitwendige katheter kan zowel thuis als in een klinische setting worden toegepast.



Onderscheidende performance

- In vergelijking met vergelijkbare producten op de markt.

Geweldige resultaten op het gebied van:

- Waterdampdoorlaatbaarheid, de huid kan goed ademen.
- Voldoende kleefkracht over de gehele katheter waardoor de katheter niet zomaar afschuift.
- Boordrand die verstevigd is kan een beter draagcomfort geven.

Voordelen

Minder risico op lekkage en stagnatie

- Goede kleefkracht houdt product op zijn plaats.
- Soepele, anti-draai boordrand is ontworpen om de doorstroming te bevorderen waardoor stagnatie in de urinebuis voorkomen wordt.

Huidvriendelijk kathetermateriaal

- De hoge huidtolerantie van silicone minimaliseert allergische reacties.⁵
- De conditie van de huid is eenvoudig te controleren omdat het materiaal transparant is.

Effectief pas- en meetsysteem

- De los verkrijgbare meters en de meegeleverde meter helpt je bij het kiezen van de juiste maat.
- Keuze uit 15 verschillende katheters variërend in lengte en diameter zorgen voor een goede pasvorm.

Betrouwbaar oplossing voor dag en nacht

- Geeft 24 uur onafhankelijkheid.
- Kan worden aangesloten op diverse Urimed®-urineopvangzakken.

Slimme tools in de verpakking


Meter voor het bepalen van de juiste maat product.



30 stuks individueel verpakt, handig om discreet mee te nemen.




Uitwasbaar handdoekje voor om de penis te doen tijdens het aanbrengen, om te voorkomen dat schaamhaar vastkleeft. Scheren is niet nodig.

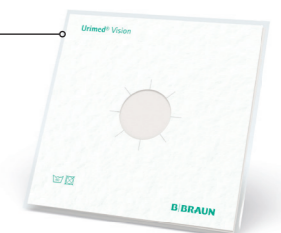


Kies de juiste externe katheter

Selecteer een passende Urimed® Vision

1 Bepaal lengte en diameter met de meegeleverde meter

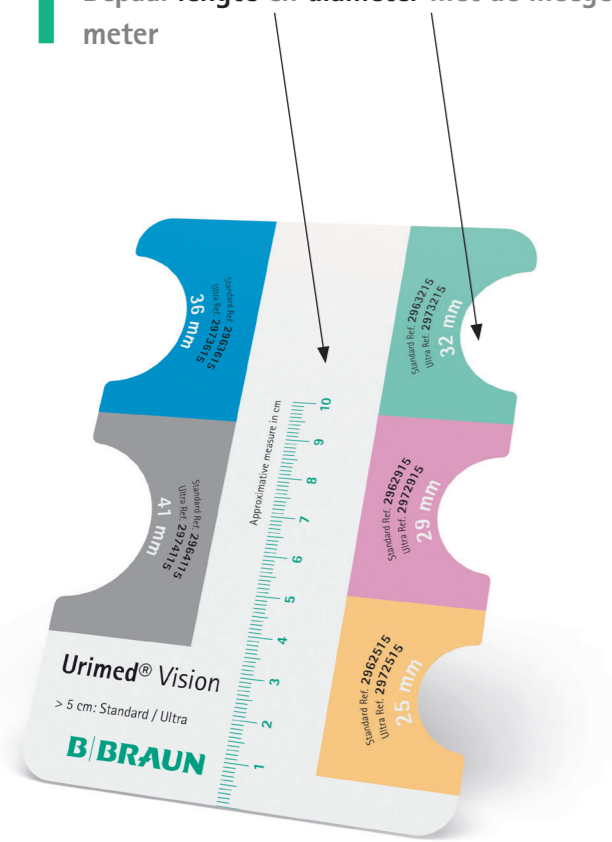

2 Kies het juiste product op basis van je meetresultaat

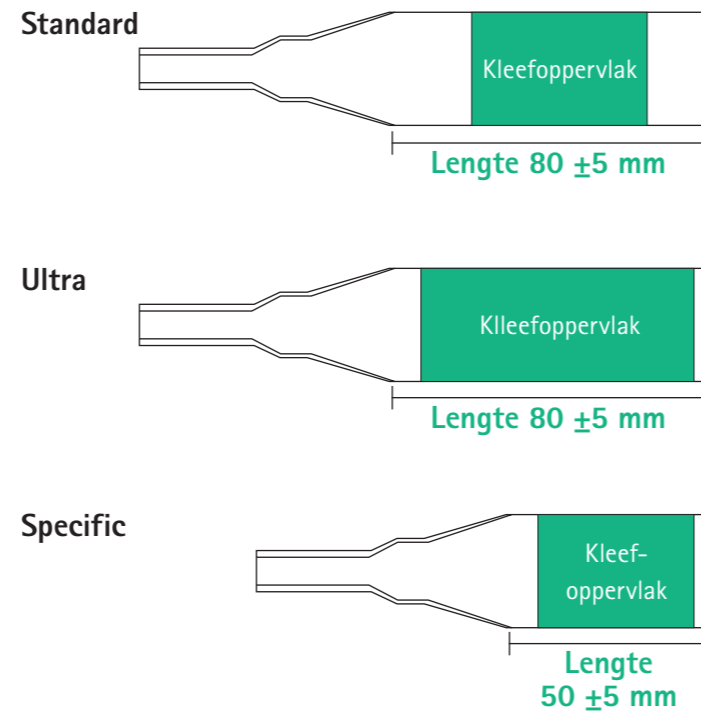

3 Bepaal welke katheter geschikt is

Maat	Product	Referentie	Maat	Product	Referentie
25 mm	Urimed® Vision Standard	2962530	36 mm	Urimed® Vision Standard	2963630
	Urimed® Vision Ultra	2972530		Urimed® Vision Ultra	2973630
	Urimed® Vision Specific	2982530		Urimed® Vision Specific	2983630
29 mm	Urimed® Vision Standard	2962930	41 mm	Urimed® Vision Standard	2964130
	Urimed® Vision Ultra	2972930		Urimed® Vision Ultra	2974130
	Urimed® Vision Specific	2982930		Urimed® Vision Specific	2984130
32 mm	Urimed® Vision Standard	2963230			
	Urimed® Vision Ultra	2973230			
	Urimed® Vision Specific	2983230			

4 Kies een geschikte opvangzak

Aan de hand van de toepassing, dag of nacht of beiden
Hoeveelheid urine

☀ dag 🌙 nacht 🥛*
1 glass = 250 mL

☀	☀ ☀ ☀	☀ / 🌙 ☀ ☀ ☀ ☀ ☀
<p>Urimed® Bag Plus Volume: 0.5 L</p>	<p>Urimed® Tribag Plus Volume: 0.8 L</p>	<p>Medicare® Urimed® Bag Volume: 2 L Urimed® Bag Plus Volume: 1.5 L</p>

* Volume dagelijks urineverlies

5 Kies eventueel een accessoire




Beenzak accessoire



Nachtzak accessoire



Bestelinformatie

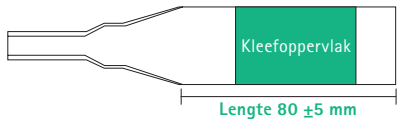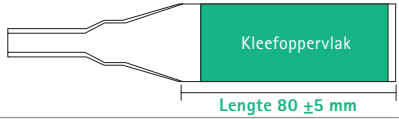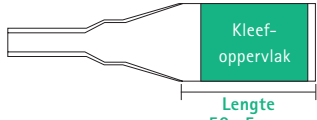Productversie	Maat	Aantal/box	Referentie	Z-indexnummer
 <p>Urimed® Vision Standard</p>	25 mm	30	2962530	16198352
	29 mm	30	2962930	16198360
	32 mm	30	2963230	16198379
	36 mm	30	2963630	16198387
	41 mm	30	2964130	16198395
 <p>Urimed® Vision Ultra</p>	25 mm	30	2972530	16198409
	29 mm	30	2972930	16198417
	32 mm	30	2973230	16198425
	36 mm	30	2973630	16198433
	41 mm	30	2974130	16198441
 <p>Urimed® Vision Specific</p>	25 mm	30	2982530	16198336
	29 mm	30	2982930	16198344
	32 mm	30	2983230	16198468
	36 mm	30	2983630	16198476
	41 mm	30	2984130	16198484

Urinezakken	Product	Lengte tube	Ø Tube	Aantal/box	Referentie	Z-indexnummer
Voor dag	Urimed® Bag Plus 0.5 L	60 cm cut to fit	9 mm	10	28501A	15832074
	Urimed® Tribag Plus 0.8 L	60 cm cut to fit	9 mm	10	28306	15822915
Voor dag en nacht	Urimed® Bag 2 L	120 cm verbonden connector	9 mm	10	28300A	15826236
	Urimed® Bag Plus 1.5 L	90 cm cut to fit	9 mm	10	28150A	15378632

Accessoires	Product	Maat	Aantal/box	Referentie	Z-indexnummer
Beenzak accessoires	Urimed® Straps		1 paar	68551	15820335
Nacht accessoires	Urimed® Handle	Small	1	68548R	15859142

Referenties

- Irwin DE, Kopp ZS, Agatep B, Milsom I, Abrams P. Worldwide prevalence estimates of lower urinary tract symptoms, overactive bladder, urinary incontinence and bladder outlet obstruction. *BJU Int.* 2011 Oct;108(7):1132-8. doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09993.x. Epub 2011 Jan 13. PMID: 21231991.
- Shamliyan TA, Wyman JF, Ping R, Wilt TJ, Kane RL. Male urinary incontinence: prevalence, risk factors, and preventive interventions. *Rev Urol.* 2009 Summer;11(3):145-65. PMID: 19918340; PMCID: PMC2777062
- Stothers L, Thom D, Calhoun E. Urologic diseases in America project: urinary incontinence in males--demographics and economic burden. *J Urol.* 2005 Apr;173(4):1302-8. doi: 10.1097/01.ju.0000155503.12545.4e. PMID: 15758786.
- Chartier-Kastler E, Ballanger P, Petit J, Fourmarier M, Bart S, Ragni-Ghazarossian E, Ruffion A, Le Normand L, Costa P. Randomized, crossover study evaluating patient preference and the impact on quality of life of urisheaths vs absorbent products in incontinent men. *BJU Int.* 2011 Jul;108(2):241-7. doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09736.x. Epub 2010 Oct 15. PMID: 20950307
- Lund HG, Turkle J, Jewell ML, Murphy DK. Low Risk of Skin and Nipple Sensitivity and Lactation Issues After Primary Breast Augmentation with Form-Stable Silicone Implants: Follow-Up in 4927 Subjects. *Aesthet Surg J.* 2016 Jun;36(6):672-80. doi: 10.1093/asj/sjv266. Epub 2016 Apr 26. PMID: 27118002; PMCID: PMC5127413.

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 11 24 | customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.