



### katheteronderhoud en blaasspoeling

Uro-Tainer® is een gesloten systeem en direct gebruiksklaar! Regelmatig gebruik van Uro-Tainer® Saline voorkomt dat de katheter verstopt raakt door slijm en debris. Waardoor de katheter minder vaak vervangen hoeft te worden.

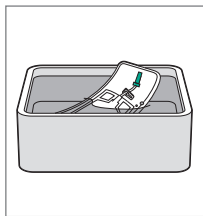


#### Stap 1

Uro-Tainer® is steriel verpakt en mag pas uit de verpakking worden gehaald wanneer je het product gaat gebruiken. Dompel de verpakte zak in lauw water totdat deze op lichaamstemperatuur is (37 graden).

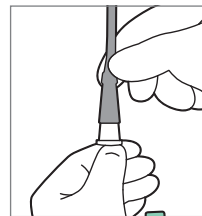

#### Stap 6

Sluit de connector aan op de katheter. Laat de Uro-Tainer® vloeistof in de katheter stromen zoals weergegeven bij stap 7.

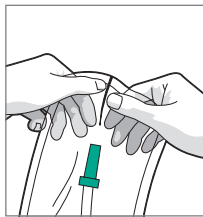


#### Stap 2

Scheur de verpakking open en haal de Uro-Tainer® uit de plastic verpakking.



#### Stap 7

Houd Uro-Tainer® boven het blaasniveau. Laat de vloeistof door zwaartekracht in de blaas stromen. Knijp niet in de zak. Wacht totdat er geen vloeistof meer naar binnen stroomt.

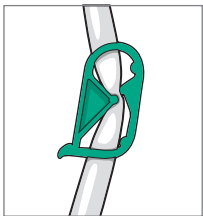


#### Stap 3

Sluit de klem door deze samen te drukken en vast te klikken.




#### Stap 8

Houd Uro-Tainer® onder het blaasniveau zodat de gebruikte vloeistof terug kan stromen in de zak. Sluit de klem als de zak vol is en haal Uro-Tainer® uit de katheter.

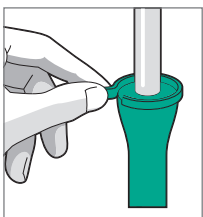


#### Stap 4

Verwijder de afscheurbare sluitring helemaal. Draai de dop los en verwijder deze zonder de steriele connector aan te raken.

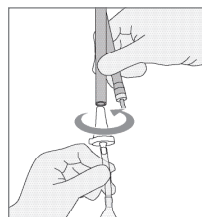

#### Stap 9

Verwijder de connector uit de katheter door voorzichtig te draaien. Sluit nu de katheter aan op een urinezak. Uro-Tainer® is voor eenmalig gebruik, gooi deze weg.

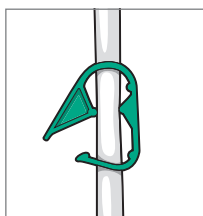

#### Stap 5

Open de klem en laat een paar druppels vloeistof in de katheter stromen om eventuele luchtballen te voorkomen.

Deze gebruiksinstructie geeft extra informatie over het gebruik van Uro-Tainer®. Lees voor gebruik altijd eerst de bijsluiter.

