





VERRASSEND  
PRAKTISCH

## Gebruiksaanwijzing Actreen® Mini cath


Enmalige katheter voor vrouwen

# Actreen® Mini cath

## Gebruiksaanwijzing

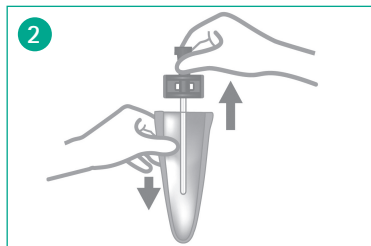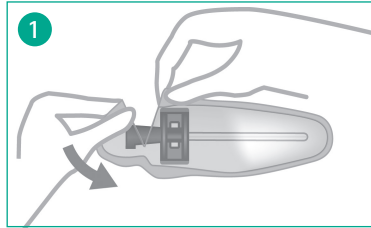

Tip: gebruik een spiegelkje

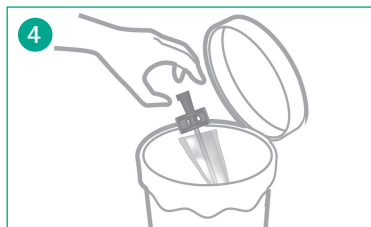

- Controleer of de verpakking onbeschadigd is.
- Was zorgvuldig je handen en genitaliën.
- Scheur de verpakking open bij de markering aan de kant van het verbindingstuk.

- Pak het verbindingstuk vast zodat je de katheter niet met de vingers aanraakt.
- De katheter is gesteriliseerd en voorzien van een glijmiddel. Daardoor is deze direct klaar voor gebruik. Kijk voor het inbrengen of het glijmiddel gelijkmatig over de katheter is verdeeld.

- Duw met één hand je schaamlippen uit elkaar om de plasbuis vrij te maken. Gebruik je andere hand om de katheter voorzichtig door de plasbuis in te brengen totdat de urine begint te stromen.
- Wacht tot de urine stopt met stromen. Druk zacht op je onderbuik om er zeker van te zijn dat de blaas volledig leeg is.
- Trek de katheter voorzichtig uit de plasbuis.

- Stop de katheter terug in de verpakking.
- Gooi de katheter weg bij het plastic afval, deze is namelijk recyclebaar.
- Was zorgvuldig je handen.

# Actreen® Mini cath

## Productinformatie

### Voordelen

- Geen vlekken op je kleding, direct gebruiksklaar
- Zittend plassen, korte katheter (9 cm)
- Blijft 60 minuten glad na opening
- No-touch verpakking voor optimale hygiëne
- Vleugels voor goede grip en sturing
- Milieuvriendelijk, minimale verpakking en recyclebaar
- Ongezien meenemen, past in je mouw of broekzak



Maat	Besteleenheid	Artikelnummer	Z-index
■ CH8	30 stuks	228008K	16776089
■ CH10	30 stuks	228010K	15597849
□ CH12	30 stuks	228012K	15597857
■ CH14	30 stuks	228014K	15597865
■ CH16	30 stuks	228016K	16776097

PSST... ik ben er ook met opvangzak!

Actreen® Mini Set met opvangzak is handig voor als er geen toilet in de buurt is.



[www.bbraun.nl/actreen](http://www.bbraun.nl/actreen)

Maat	Besteleenheid	Artikelnummer	Z-index
■ CH10	30 stuks	239010K	15948633
□ CH12	30 stuks	239012K	15948692
■ CH14	30 stuks	239014K	15948676