

Medibox® – Gebruiksaanwijzing


PLAATSEN VAN DE DEKSEL



Plaats de deksel op de naaldencontainer en druk stevig op de tegenover elkaar liggende hoeken. Druk stevig aan tot je een klik hoort.


Controleer of de deksel aan alle kanten goed vastzit!

VERWIJDEREN VAN DE NAALD

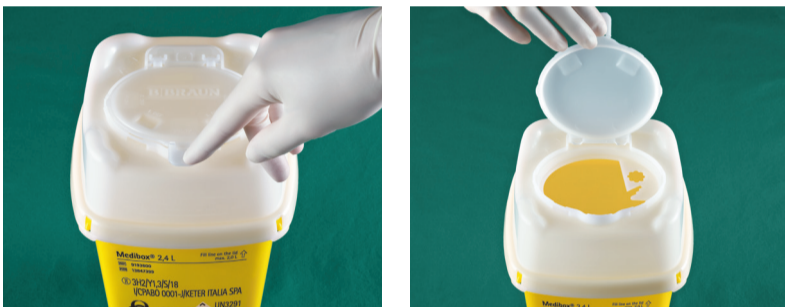

Open de deksel door lichte druk te geven op het uitstekende gedeelte. De deksel springt een stukje open.

Duw de deksel met 1 hand naar boven todat deze zich fixeert in een open stand.

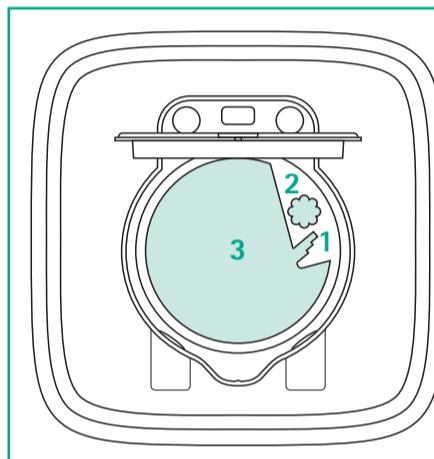

Verwijderen van:

1. luer en luer-lock naalden
2. pennaalden
3. verschillende soorten scherpe voorwerpen



1 Steek de naald in opening 1. Koppel de luer- en luer-lock-verbindingen tussen spuit en canule los.



2 Steek de naald in opening 2. Schroef de pennaald van de pen.



3 Gooi grote scherpe medische voorwerpen weg in opening 3.

SLUITEN VAN DE DEKSEL



TIJDELIJK SLUITEN

Maak de klep van de deksel los van de staande positie en druk licht op de behuizing.



PERMANENT SLUITEN

Sluit de Medibox® nadat het maximale vulvolume is bereikt (tot aan rand gele box) door gelijktijdig op de gemarkeerde drukpunten te drukken.



Gooi de permanent gesloten Medibox® weg volgens de lokale voorschriften.