

Fixatie van Introcan Safety® Deep Access

Met Statlock IV Ultra

Het correct aanbrenge van het fixatiemateriaal is essentieel om ervoor te zorgen dat de katheter goed op zijn plaats blijft. Hier afgebeeld Statlock IV Ultra.



Stap 1

Reinig de huid voor de fixatie met een huiddoekje om olie of vocht te verwijderen. Laat de huid volledig aan de lucht drogen.

Stap 2

Breng voor maximale hechting de huid beschermende Prep Pad aan op de gereinigde huid. Laat het weer volledig aan de lucht drogen.



Stap 3

Zorg ervoor dat de "push plate" van Introcan Safety® Deep Access naar boven is gericht.







Stap 4

Zorg ervoor dat de blauwe pijlen van de Statlock naar de insteekplaats wijzen. Druk de houder over de hub van Introcan Safety® Deep Access en zorg ervoor dat daarmee de drukplaat vast komt te zitten.



Stap 5

Verwijder de beschermfolie aan beide zijden om de Statlock op de huid van de patiënt te bevestigen. Dek af met een steriel occlusief transparant verband.

Gauge (G)	Lengte (mm)	Ø (mm)	Gravity flow rate (ml/min)	Power injection flow rate (viscositeit contrastvloeistof = mPa's = 2,3; 27,5)	Artikelnummer	
	18	64	1,3	85	19; 15	4251620-01
	20	64	1,1	51	13; 8	4251621-01
	22	64	0,9	24	7; 3	4251622-01
	24	32	0,7	17	5; 25	4251623-01