





Gebruiksaanwijzing Actreen® Mini Set

Enmalige katheter met opvangzak
voor vrouwen



Actreen[®] Mini Set

Gebruiksaanwijzing

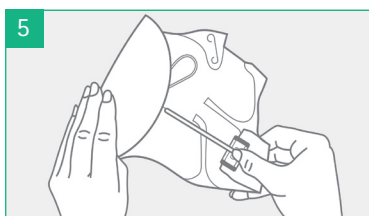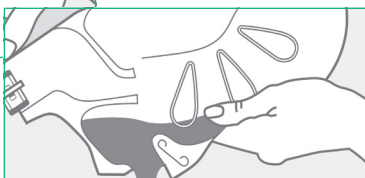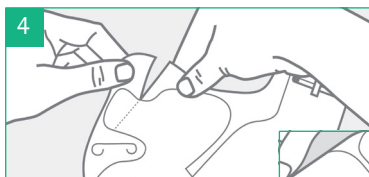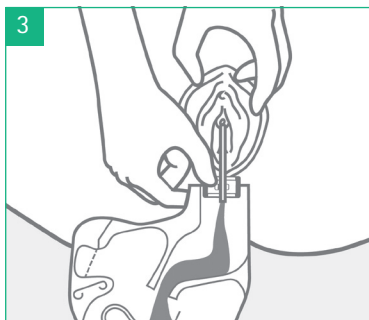

- Was zorgvuldig je handen en genitaliën
- Verwijder de witte sticker op de achterzijde en vouw de set open.
- Scheur de verpakking open langs de scheurlijn ter hoogte van de het verbindingstuk en haal de katheter eruit.
- Duw met één hand je schaamlippen uit elkaar om de plasbuis vrij te maken. Gebruik je andere hand om de katheter voorzichtig door de plasbuis in te brengen totdat de urine begint te stromen.
- Wacht tot de urine stopt met stromen. Druk zacht op je onderbuik om er zeker van te zijn dat de blaas volledig leeg is.
- Trek de katheter voorzichtig uit de plasbuis.
- Leeg de opvangzak voordat je de set weggooit.
- Scheur de opvangzak open langs de scheurlijn aan de zijkant en laat de urine weglopen.
- Vouw de katheter naar binnen en rol de opvangzak op. Plak de set dicht met de sticker.
- Gooi de set weg bij het plastic afval, deze is recyclebaar.
- Was zorgvuldig je handen.

Voordelen

- Je blaas legen wanneer er geen toilet in de buurt is.
- Je ziet hoeveel je plast door opvangzak met maataanduiding.
- Opvangzak neerleggen na katheteriseren, deze loopt niet leeg.
- Geen vlekken op je kleding, direct gebruiksklaar.
- Vleugels voor goede grip en sturing.
- Blijft 60 minuten glad na opening.
- No-touch verpakking voor optimale hygiëne.
- Gemakkelijk meenemen, past in je mouw of broekzak.



Actreen® Mini Set met opvangzak

Maat	Referentie	Z-indexnummer	Besteleenheid
■ CH10	239010K	15948633	30 stuks
□ CH12	239012K	15948692	30 stuks
■ CH14	239014K	15948676	30 stuks



Er is ook een uitvoering zonder opvangzak!
Handig voor gebruik op het toilet.

Actreen® Mini Cath zonder opvangzak

Maat	Referentie	Z-indexnummer	Besteleenheid
■ CH8	228008K	16776089	30 stuks
■ CH10	228010K	15597849	30 stuks
□ CH12	228012K	15597857	30 stuks
■ CH14	228014K	15597865	30 stuks
■ CH16	228016K	16776097	30 stuks





Wil je meer weten over onze oplossingen en producten voor katheterisatie?

Ga naar www.bbraun.nl/patientenzorg/aandoeningen/urineretentie of scan de QR-code.



B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | homecare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.